


## Guide de démarrage rapide eTact®


Système de mesure et d'enregistrement de l'activité et indication de température cutanée.

Cher client, nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du système eTact®, destiné à la mesure de l'activité et d'une indication de température cutanée. Ce guide de démarrage rapide vous donnera quelques recommandations liées à la première utilisation.


 Il ne remplace en aucun cas le **manuel utilisateur stocké sur la clé USB** livrée avec votre système. Pour un usage optimal de l'ensemble des fonctionnalités, il vous est fortement recommandé de lire le manuel utilisateur.

### Votre système eTact® est composé de 4 éléments.

- Le patch eTact®
- Un câble de connexion, permettant de recharger votre système et de le connecter à un PC/MAC
- Le logiciel « eTact Watcher », stocké sur la clé USB livrée avec votre système
- Le logiciel PC/Mac « eTact Analysis » utilisé pour le traitement et l'analyse des données issues du patch. Le logiciel est stocké sur la clé USB livrée avec votre système.

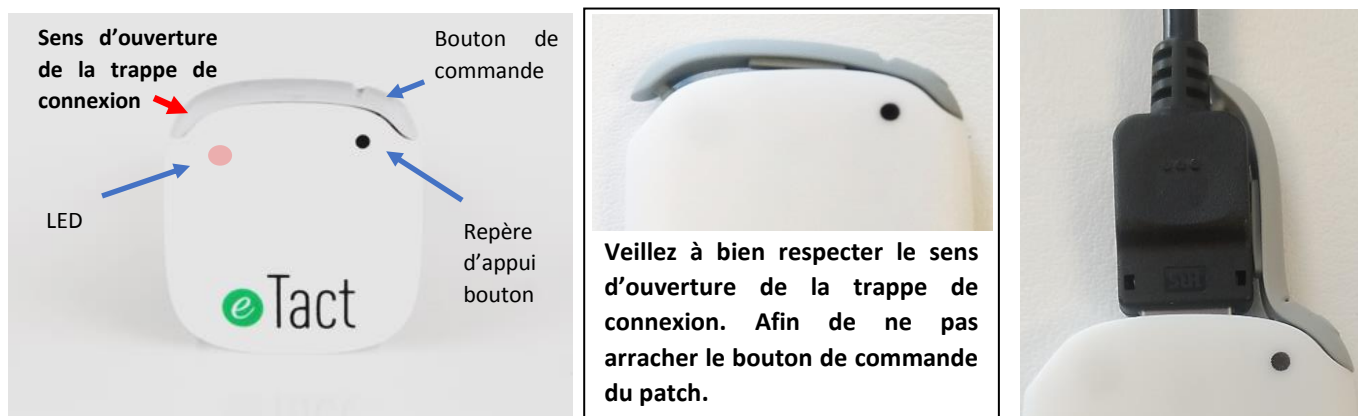

**Figure 1 : Présentation de votre patch eTact® et de son mode de connexion filaire avec le câble dédié, fourni avec votre système.**

 **ATTENTION, le Patch eTact® est sensible à l'eau et à l'humidité. Veillez à le protéger de la sueur ou des projections d'eau. Vous pouvez pour cela utiliser les pansements fournis avec votre système.**

Pour toute question relative au fonctionnement du système, dont les réponses ne figurent pas dans le manuel utilisateur, contactez BodyCap :

**BODYCAP**  
**3 rue du Docteur Laennec**  
**14200 Hérouville St Clair**  
**FRANCE**  
+33. (0)2.61.53.08.14  
support@bodycap-medical.com  
www.bodycap-medical.com



## Guide de démarrage rapide eTact®

Système de mesure et d'enregistrement de l'activité et  
indication de température cutanée.

### Première utilisation, Instructions élémentaires

Avant la première utilisation de votre système, vous devez réaliser un ensemble d'opérations.

#### 1 Installation du logiciel eTact Watcher.

Vous devez installer votre logiciel eTact Watcher avant toute utilisation de votre système. C'est l'outil indispensable pour paramétrer eTact®. Pour installer le logiciel eTact Watcher et les pilotes nécessaires pour le câble de connexion, veuillez lancer l'installateur « eTACT\_Watcher » présent sur la clé USB fournie dans le coffret de démarrage.

Configuration minimum requise :

Processeur 1GHz

- ✓ 500 Mo de RAM
- ✓ 200 Mo d'espace disque requis pour l'installation
- ✓ Système d'exploitation Windows 7® ou ultérieurs compatibles (32 ou 64 bits) / Mac OS X (10.9 Lion) ou ultérieurs
- ✓ Résolution d'écran minimum 1024x768

#### 2 Mise en place

**Sortir eTact® du mode étagère :** eTact® a été placé en mode étagère en sortie d'usine. Pour le sortir du mode étagère, il suffit de brancher le câble fourni au patch et de le connecter à une prise USB alimentée électriquement. Les LEDs s'allument à ce moment pour signaler que le patch est activé.

**Charger la batterie :** La batterie nécessite une première charge complète. Laisser le patch eTact® connecté à une source USB provenant d'un chargeur secteur ou d'un PC/MAC pendant environ deux heures, en utilisant le câble fourni à cet effet.

**Configurer le patch :** Connecter le patch à un ordinateur possédant l'application « eTact Watcher » et lancez-la. A l'ouverture de la première fenêtre, sélectionnez l'onglet « Configuration ». Configurez ensuite toutes les options de fonctionnement.

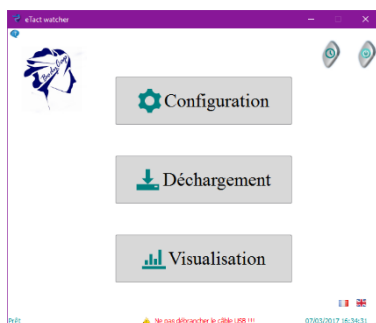


Figure 2 : Ecran d'accueil de l'IHM eTact Watcher

#### 3 Réalisation d'un Enregistrement

Après validation de la configuration du système à partir d'eTact Watcher, le patch eTact® se met en fonctionnement dès qu'il est débranché. Seul le mode « Mémoire » est décrit dans ce guide.




## Guide de démarrage rapide eTact®

Système de mesure et d'enregistrement de l'activité et indication de température cutanée.

L'utilisation du patch en mode Mémoire, permet de stocker les données collectées au sein du Patch et de constituer un fichier de données complet.


### 4 Déchargement et visualisation des données

Afin de télécharger les données enregistrées dans la mémoire du patch vers votre PC / Mac, connecter le patch à votre ordination et cliquer sur « Déchargement ». Suivre ensuite les instructions d'enregistrement du fichier. L'onglet « Visualisation » permet ensuite de sélectionner un fichier enregistré et d'afficher un graphique d'activité et/ou de température.

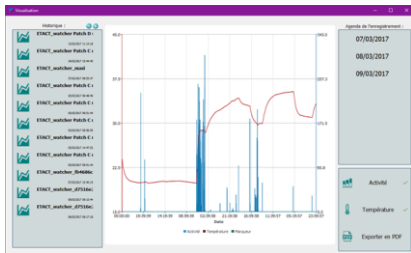

**Figure 3 : Onglet de visualisation des données d'actimétrie et de températures collectées**


### 5 Arrêt du système

Votre patch peut être éteint à partir de la fenêtre d'accueil de l'IHM eTact Watcher, en sélectionnant le bouton  situé en haut à droite de l'écran (Figure 2).

### 6 Check-list avant utilisation

Vérifier la configuration d'enregistrement de votre système.  
Vérifier l'état de Batterie avant de démarrer l'enregistrement.

L'autonomie en batterie de votre système dépend directement de la configuration des paramètres de fonctionnement sélectionnés. En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé recharger régulièrement la batterie.

Dans le cas où le patch eTact® est utilisé en mode Mémoire et s'éteint pendant l'enregistrement en raison d'une batterie faible, vous devez obligatoirement reconfigurer l'heure et la date de votre patch à partir de l'interface de configuration eTact Watcher à l'aide du bouton .

Il peut également être mis à l'heure en mode filaire à partir de la page Web :

<https://www.bodycap-medical.com/eTact/eTact.html>